



ディスポーザブル 動物用エコー針

DISPOSABLE ECHOGENIC VETERINARY NEEDLE



動物用エコー針

シンボルマーク



ランセットポイント SB
(ショートベベル)


超音波画像下での施術において
視認性を追求した動物用エコー針がユニシスから登場。
螺旋状に刻まれたエコーマークの反射により安全な穿刺をサポートします。

針の表面にエングレーブ加工を施し、超音波画像下における針の視認性を追求しました。
動物の皮膚への切れ味にこだわり、シリコンオイルを塗布することで更なる切れ味を追求しました。
(プローブガイド対応サイズもご用意しておりますので、より安全にご使用いただけます。)

特徴

●ユニシスのエングレーブ(エコーマーク)

エングレーブとは、針の表面に極めて微細な溝を施す加工方法で、針管の針先付近から約15mmの範囲に密な2本の螺旋を刻み込みました。この溝による超音波の反射が超音波画像下に白陰として現れ、針管のコントラストが針の行方を失わせず、安全な穿刺をサポートします。

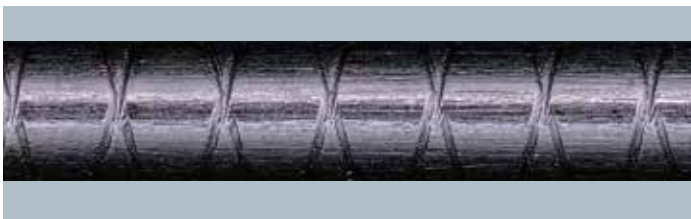


●超音波画像下での穿刺映像



協力：富士フイルム FAZONE シリーズ
エコー針の反射による白陰画像

各部名称および略図

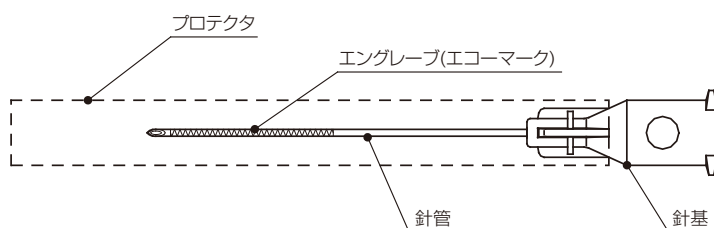

針先の形状

●ランセットポイント SB(ショートベベル)

針先は切れ味の良いランセットポイントを採用。エングレーブ加工を施してありながら、滑らかに加工されている針先は、動物の皮膚に対して抵抗がなくスムーズな穿刺を実感できます。先端にシリコンオイルを塗布することにより、皮膚の硬い動物へのスムーズな穿刺をサポートします。



ランセットポイント(横から)



ランセットポイント(斜めから)

針基

●クリスタルクリアハブ

薬液等が視認しやすいクリアハブを採用。



標準提供サイズ

[製品名称] 動物用エコー針

ゲージ	長さ	箱入数	製品コード
23G	35mm	10本/箱	A0002600
	50mm		A0003600
	70mm		A0004600
	100mm		A0006600
ゲージ	長さ	箱入数	製品コード
23G	35mm	25本/箱	A0002700
	50mm		A0003700
	70mm		A0004700

・販売名：動物用注射用針・E.O.G.滅菌済(期限5年)・動物用一般医療機器
※その他のサイズ及び製品の詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階
営業推進部直通：03-5812-7766 FAX：03-5812-8831

ユニシスウェブサイト >>> <http://www.unisis.co.jp>

(製造販売元) 株式会社 ユニシス 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

AM140307J