



<http://www.unisis.co.jp>

UNIEVER®

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

ユニセットS/E

脊髄くも膜下・硬膜外併用麻酔キット

DISPOSABLE COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA MINITRAY



ユニセットS/E (ディスポーザブル脊髄くも膜下・硬膜外併用麻酔キット)

初めてCSEAの実施を考えている医師のために

脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔を一度の穿刺で実施できます。

シンプルなキット構成ですが、必須である硬膜外麻酔針と脊髄くも膜下麻酔針は針の専門メーカーとして信頼の確立された製品です。

これからCSEAの施行を考える医師のエントリーキットとして充分満足を得られる事でしょう。



脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔針
(ペンシルポイント)



脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔針
(K-3ランセットポイント)

特徴

●硬膜外カテーテル

〈生体適合性〉

ポリウレタン製のカテーテルは生体適合性にすぐれ、温度により硬度が変化するため、体内挿入時には適度な硬さで、挿入後は体温で温められて適度に柔らかくなり、切断の恐れを低減しております。

〈先端部の工夫〉

先端は閉塞加工を行い、側面に三孔を螺旋状に穿孔しております。これにより挿入時の引っかかりと麻酔の片効きを減らしております。



●脊髄くも膜下麻酔針

硬膜外麻酔針からNeedle-Through-Needleで突出した脊髄くも膜下麻酔針の長さは標準突出長2種(7mm、11mm)をご用意しております。また、脊髄くも膜下麻酔針の先端は、K-3ランセットポイントと非侵襲的なペンシルポイントの2種をご用意しております。



ペンシルポイント針先



K-3ランセットポイント針先

説明

●硬膜外麻酔針


〈センターパスホールタイプ〉

硬膜外麻酔針のバックアイ(パスホール)が針の内径の中心に對して的確な位置に設計されているため、初めて使用される場合でも脊髄くも膜下麻酔針のバックアイ通過を確実に行うことができます。




〈オープンチップタイプ〉

従来の硬膜外麻酔針をCSEA用に利用したものです。硬膜外麻酔に先行する、脊髄くも膜下麻酔により、硬膜外麻酔単独より早い“Onset-Time”で十分な麻酔効果を得ることができます。

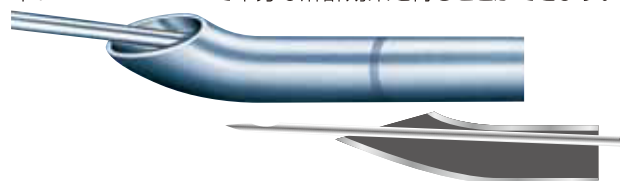

構成品略図(基本)

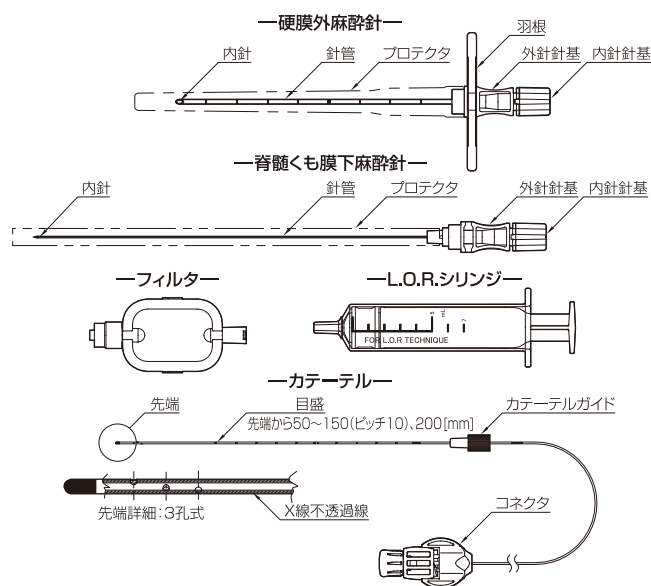

標準提供サイズ

【製品名称】ディスポーザブル脊髄くも膜下・硬膜外併用麻酔キット

硬膜外麻酔針 ヒューバーポイント	硬膜外 カテーテル 20G 1000mm	脊髄くも膜下 麻酔針	脊麻針 突出長	付属品	製品コード	
G:ゲージ/ カラー コード	長さ					
17G	80mm	3孔式	K-3ランセットポイント 26G110mm	最大7mm	カテーテルガイド コネクタ フィルタ	51602600
			ペンシルポイント 26G114mm	最大11mm		51612600
18G		K-3ランセットポイント 26G110mm	最大7mm	L.O.R.シリンジ 硬膜外ラベル 各1	51618600	
		ペンシルポイント 26G114mm	最大11mm		51625600	

包装単位：10セット/箱

販売名：ユニセット

E.O.G.滅菌済み

※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

業事承認番号 20600BZZ00825000

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F
国内営業部 Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社ユニシス 埼玉工場

取扱店