

# 眼科用針とシリンジの正しい接続方法

眼科用針とシリンジ(1mL)\*<sup>1</sup>を接続する際には以下の手順で接続してください。  
接続時の過度な締め付けはしないよう注意してください。

\*1) 弊社のマイクロシリンジあるいはその他のマイクロシリンジ・プレフィルドシリンジ等が対象

**OK** 手順 ① シリンジを持つ手は固定する。



② 針基(キャップ)を持ちゆっくりと回して接続。



**NG** 手順① 針側(キャップ側)を回さずシリンジ側を回してしまう。



**NG** 手順② 針側(キャップ側)とシリンジ側の両方を回してしまう。



※誤った手順で使用した際には接続の緩みや製品の破損に繋がる恐れがございます。

## 注意事項

### 【眼科用針とシリンジ接続時】

- ・過度な締め付けはしないこと(針基が外れやすくなる、又は針基が破損する可能性がある)
- ・シリンジ側は回さず、針側(キャップ)を回して接続すること(シリンジ側・針側とシリンジ側の両方を回した場合過度な締め付けによる針基の外れや破損に繋がる可能性がある)
- ・接合部分に薬液等を付着させないこと(接合部緩み等が生じる可能性がある)

### 【キャップを外す時】

- ・キャップを外す時、針先がキャップに触れないように注意すること(針管に曲がりや破損が生じる可能性がある)

## 製品情報

【製品名称】ディスプレイ低侵襲眼科用針

ゲージ	長さ(mm)	品目コード
31G	8.0	454026A
	12.0	454036A
34G	8.0	454046A

先端形状: ランセットポイント

薬事認証番号: 227AMBZX00004Z00

包装・出荷単位: 100本/箱 販売名: UNIEVER 眼科用針

お問合せ先

 **株式会社 ユニシス**

〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F  
国内営業部 Tel: 03-5812-7768 Fax: 03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <https://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 ユニシス 埼玉工場

【製品名称】ディスプレイシリンジ(ローデッドスペースタイプ)

仕様	品目コード
1mL(ロック)	511097A

薬事届出番号: 11B1X00028000002

包装・出荷単位: 100本/箱

販売名: UNIEVER 注射筒

取扱店